

Hemoglobin Calibrator

Калибратор гемоглобина



Хранить при температуре 2-8°C

Конфигурация

REF	HBS02
VOL	1 мл
Калибратор гемоглобина	1 x 1 мл
Прибор	Универсальный

Предназначение

Калибратор гемоглобина предназначен для определения концентрации гемоглобина в крови человека. Калибратор используется для калибровки в ручных и автоматизированных процедурах. Только для in vitro диагностики. Только для профессионального использования.

Состав Реагента

Кровь животных, стабилизированная.

Концентрация: 15 г/дл

Меры предосторожности

Калибратор не содержит компонентов человеческого происхождения. Тем не менее, рекомендовано обращаться с сывороткой с должным вниманием.

H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. P273: избегать попадания в окружающую среду. P501: Утилизировать содержимое в соответствующий контейнер, соблюдая соответствующие местные / региональные / национальные / международные правила.

Приготовление

Калибратор готов для использования.

Хранение, стабильность и утилизация

Калибратор стабилен при температуре 2-8°C до даты истечения срока годности, указанного на этикетке, при хранении плотно закрытым и предотвращении загрязнения во время использования.

Процедура

Калибратор должен использоваться в соответствии с инструкциями по анализу гемоглобина.

11.2019, Rev. 5.0

